



# ROOKE® HFS™ BOOT

Heel Float System



Foot Drop Strap	3 Extenders	Scissors	Anti-Rotation Wedge (optional)
Sangle pour pied tombant	3 Sangles d'extension	Ciseaux	Coin anti-rotation (en option)
Correa para pie caído	3 Correas de extensión	Tijeras	Cuña antirrotación (opcional)
Fallfußgurt	3 Verlängerungsgurte	Schere	Anti-Rotations Keil (freiwillig)
Tirante a strappo	3 Strap estensibili	Forbici	Cuneo antirotazione (facultativo)

 **ROOKE® HFS™ BOOT**  
Heel Float System

Placement of Foot Drop Strap Across Metatarsal Heads

Positionner la sangle de maintien du pied tombant en suivant les têtes du métatarse

Colocación de la correa para pie caído sobre las cabezas de los metatarsianos

Platzierung des Fallfußgurtes quer über die Metatarsalköpfe

Posizionamento del tirante a strappo al di là del metatarso



Placement of Anti-Rotation Wedge

Positionnement du coin anti-rotation

Colocación de la cuña antirrotación

Platzierung des Anti-Rotationskeils

Posizionamento del cuneo antirotazione





# ROOKE® HFS™ BOOT

Heel Float System


Opening Tabs for Heel Assessment

Ouverture des onglets latéraux pour évaluation du talon

Abertura de las lengüetas para evaluar el talón

Öffnen der Laschen für die Fersenbeurteilung

Alette apribili per consentire accertamenti al tallone

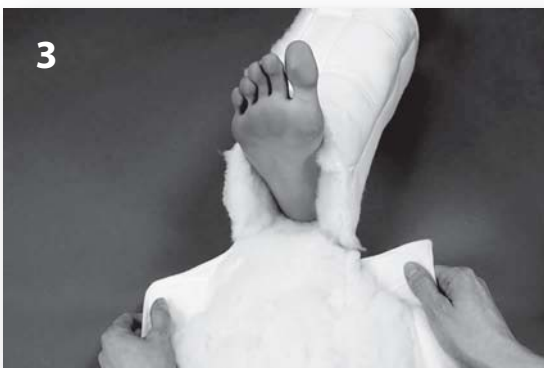



# ROOKE® HFS™ BOOT

Heel Float System

Use Extension Straps if Needed

Utiliser les languettes d'extension, si nécessaire

Utilice las correas de extensión si fuese necesario

Bei Bedarf die Verlängerungsgurte verwenden

Usò degli strap estensibili ove necessario



 **ROOKE® HFS™ BOOT**  
Heel Float System

Trimming the Boot to Fit Smaller Feet  
Cut Outside of Dark Line

Découpage de la botte pour l'adapter à un pied de petite taille  
Découper juste après la couture foncée (distalement)

Recorte de la bota para adaptarse a pies más pequeños  
Corte por fuera de la línea oscura

Zuschneiden des Stiefels für kleinere Füße  
Außerhalb der dunklen Linie schneiden

Tagliare con le forbici lo stivaletto per adattarlo a un piede di lunghezza inferiore  
Tagliare al di fuori della riga nera





# ROOKE® HFS™ BOOT

Heel Float System

Trimming the Boot to Fit Smaller Feet, Cut Outside of Dark Line

Pour découper la botte et l'adapter à un pied de petite taille, couper juste après la couture foncée

Recorte de la bota para adaptarse a pies más pequeños. Corte por fuera de la línea oscura

Zuschneiden des Stiefels für kleinere Füße, außerhalb der dunklen Linie schneiden

Per adattare lo stivaletto a un piede di lunghezza inferiore, tagliare al di fuori della riga nera



 **ROOKE® HFS™ BOOT**  
Heel Float System

Access for Tubes--Cut **Between** Lines

Accès pour les tubulures: couper au milieu de la double couture

Acceso para los tubos. Corte entre las líneas

Zugang für Schläuche--Zwischen den Linien schneiden

Inserimento dei tubi : tagliare lungo le linee



 **ROOKE® HFS™ BOOT**  
Heel Float System

Cut **Between the Lines** if Needed for Temperature Control or Wound Assessment

Couper au milieu de la double couture si nécessaire pour ventiler la jambe ou évaluer les plaies

Corte entre las líneas si fuese necesario para controlar la temperatura o evaluar la herida

Falls zur Temperaturkontrolle oder Wundbeurteilung notwendig, zwischen den Linien schneiden

Tagliare lungo le linee se si necessita di controllare la temperatura o per valutare lo stato delle ferite



**Osborn Medical Corporation**      **[www.RookeBoot.com](http://www.RookeBoot.com)**

Phone +1 507.932.5028    Fax +1 507.932.5044    100 West Main Street, Utica, MN 55979, USA